
Montaganleitung - Haltegriff


HELVEO **CURVE** line

Art.-Nr. HW0.1003.501

Art.-Nr. HW0.1004.501

Art.-Nr. HW0.1005.501

Art.-Nr. HW0.1006.501

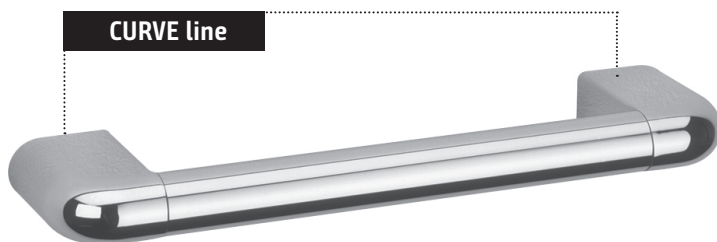

Bitte lesen Sie vor der Installation und dem Gebrauch dieses HELVEO-Produkts die Montage- und Pflegehinweise gründlich durch. Die NOSAG AG haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Hinweise ergeben.

BILD 1


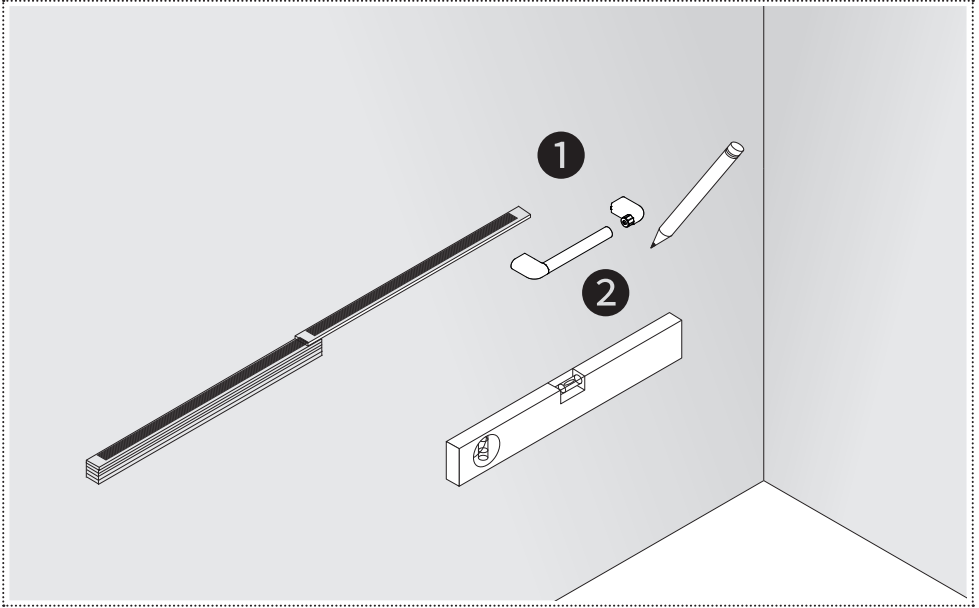


BILD 2



Prüfen Sie bitte folgende Voraussetzungen vor der Montage des Produkts »

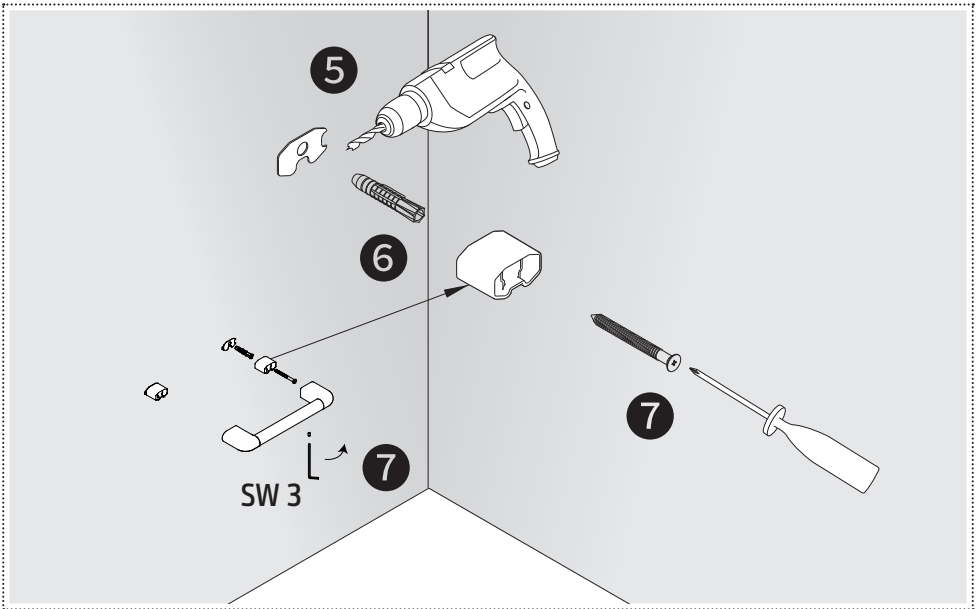

- » Die Wand muss über die nötige Tragfähigkeit verfügen.
- » Evtl. vorhandene Gas-, Wasser- und elektrische Leitungen dürfen bei der Montage nicht beschädigt werden.
- » Beachten Sie bitte vor der Montage die Montageempfehlungen der DIN 18040 Teil 1 und Teil 2.
- » Prüfen Sie die Verpackung auf den kompletten Lieferumfang (s. Rückseite).

MONTAGESCHRITTE

- 1.** Haltegriff entsprechend Bild 1 zusammenstecken.
- 2.** Montageposition bestimmen, ausrichten und markieren.
- 3.** Schutzfolie von der Klebeschablone abziehen.
- 4.** Haltegriff in gewünschter Position gegen die Wand drücken und nach unten abknicken.
- 5.** Durch die auf der Wand verbleibende Klebeschablone bohren.
(Bohrdurchmesser 10 mm)
- 6.** Dübel einsetzen und Klebeschablone entfernen;
- 7.** Gewindestift an allen Konsolen des Haltegriffes lösen;
Wandbefestigungen aus den Konsolen entnehmen;
Wandbefestigungen an die Wand schrauben.
- 8.** Haltegriff auf die Wandbefestigungen stecken und die Gewindestifte an allen Konsolen des Haltegriffes vollständig einschrauben und anziehen.
- 9.** Überprüfen der Stabilität

HINWEISE

- » Montage sollte durch einen Fachmann durchgeführt werden
 - » Regelmäßige Überprüfung der Stabilität und Standfestigkeit
-

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Breite
HW0.0003.501	300 mm
HW0.0004.501	400 mm
HW0.0005.501	500 mm
HW0.0006.501	600 mm
HW0.0007.501	700 mm

Tiefe: 91 mm (alle Haltegriffe)

ANWENDUNGSBEREICH

Das Produkt ist für die Wandmontage im sanitären Heimbereich konzipiert.

LIEFERUMFANG

- » Haltegriff
- » Befestigungsset

NICHT FÜR EINHÄNGESITZE GEEIGNET!