

PFLEGEHINWEIS

Badausstattungen, wie Armaturen und Griffe, sind direktem und häufigem Wasserkontakt ausgesetzt. Es bedarf besonderer Pflege, um die Oberfläche langfristig zu erhalten. Eine regelmäßige Reinigung dient der gründlichen und hygienischen Pflege von Armaturen und Accessoires.

Verwenden Sie dazu milde Reinigungsmittel. Verzichten Sie auf aggressive, ammoniak-, chlor- und säurehaltige Reiniger sowie Lösungsmittel. Benutzen Sie ebenso keine schleifenden und scheuernden Reinigungsmittel. Achten Sie auf weiche, fusselfreie Tücher oder Schwämme. Spülen Sie nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab. Reiben Sie die Oberflächen nach dem Reinigen trocken.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Produktschäden, die durch unsachgemäße Pflege und Handhabung entstehen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Breite
HW0.1008.501	800 mm
HW0.1009.501	900 mm
HW0.1011.501	1100 mm

Tiefe: 91 mm (alle Haltegriffe)

ANWENDUNGSBEREICH

Das Produkt ist für die Wandmontage im sanitären Heimbereich konzipiert.

LIEFERUMFANG

- » Haltegriff
- » Befestigungsset

FÜR EINHÄNGESITZE GEEIGNET!


Montageanleitung - Haltegriff

HELVEO CURVE

Art.-Nr. HW0.1008.501

Art.-Nr. HW0.1009.501

Art.-Nr. HW0.1011.501

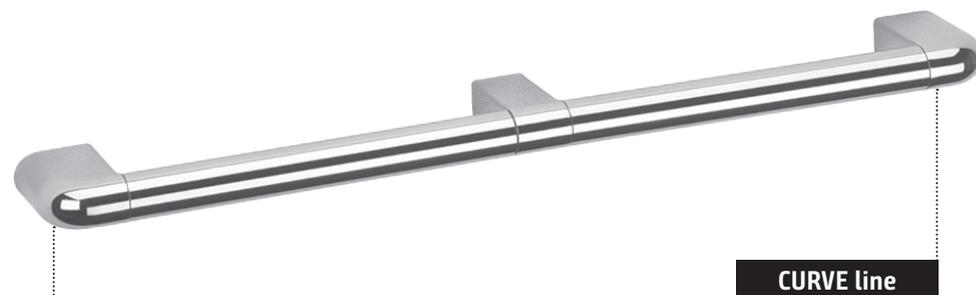

CURVE line

Bitte lesen Sie vor der Installation und dem Gebrauch dieses HELVEO-Produkts die Montage- und Pflegehinweise gründlich durch. Die Lindner Armaturen GmbH haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Hinweise ergeben.

BILD 1


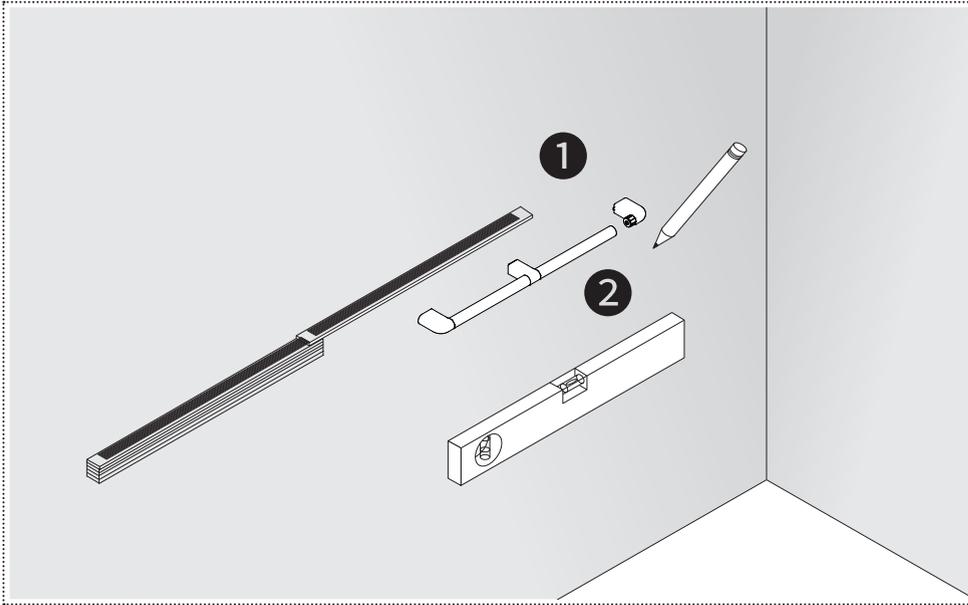


BILD 2



Prüfen Sie bitte folgende Voraussetzungen vor der Montage des Produkts »

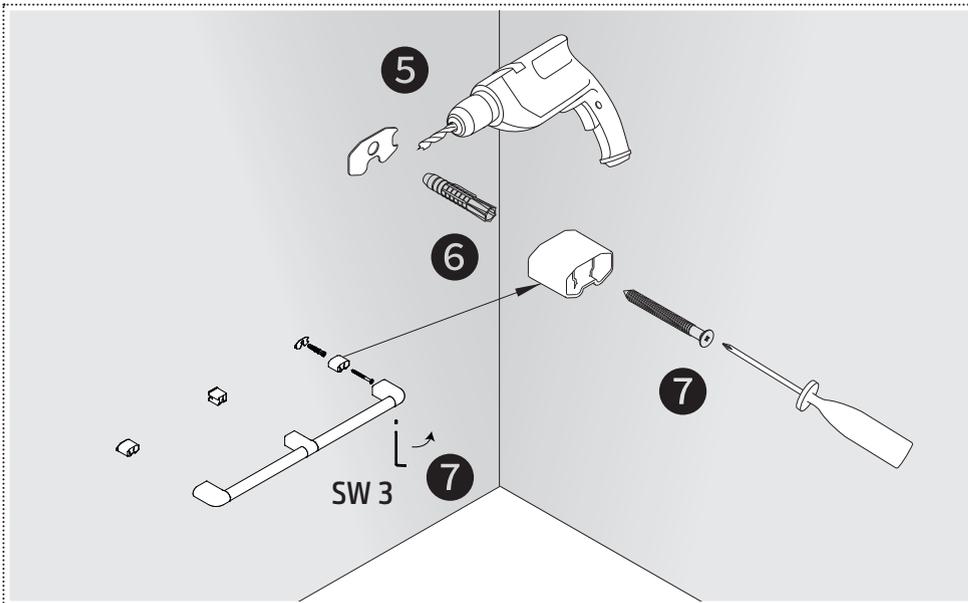

- » Die Wand muss über die nötige Tragfähigkeit verfügen.
- » Evtl. vorhandene Gas-, Wasser- und elektrische Leitungen dürfen bei der Montage nicht beschädigt werden.
- » Beachten Sie bitte vor der Montage die Montageempfehlungen der DIN 18040 Teil 1 und Teil 2.
- » Prüfen Sie die Verpackung auf den kompletten Lieferumfang (s. Rückseite).

MONTAGESCHRITTE

1. Haltegriff entsprechend Bild 1 zusammenstecken.
2. Montageposition bestimmen, ausrichten und markieren.
3. Schutzfolie von der Klebeschablone abziehen.
4. Haltegriff in gewünschter Position gegen die Wand drücken und nach unten abknicken.
5. Durch die auf der Wand verbleibende Klebeschablone bohren. (Bohrdurchmesser 10 mm)
6. Dübel einsetzen und Klebeschablone entfernen;
7. Gewindestift an allen Konsolen des Haltegriffes lösen; Wandbefestigungen aus den Konsolen entnehmen; Wandbefestigungen an die Wand schrauben.
8. Haltegriff auf die Wandbefestigungen stecken und die Gewindestifte an allen Konsolen des Haltegriffes vollständig einschrauben und anziehen.
9. Überprüfen der Stabilität

HINWEISE

- » Montage sollte durch einen Fachmann durchgeführt werden
- » Regelmäßige Überprüfung der Stabilität und Standfestigkeit