
Montageanleitung für Stützklappgriff mit Armpolster

HELVEO CURVE

Art.-Nr. HW2.1006.501

Art.-Nr. HW2.1007.501

Art.-Nr. HW2.1008.501



Bitte lesen Sie vor der Installation und dem Gebrauch dieses HELVEO-Produkts die Montage- und Pflegehinweise gründlich durch. Die NOSG AG haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Hinweise ergeben.

BILD 1


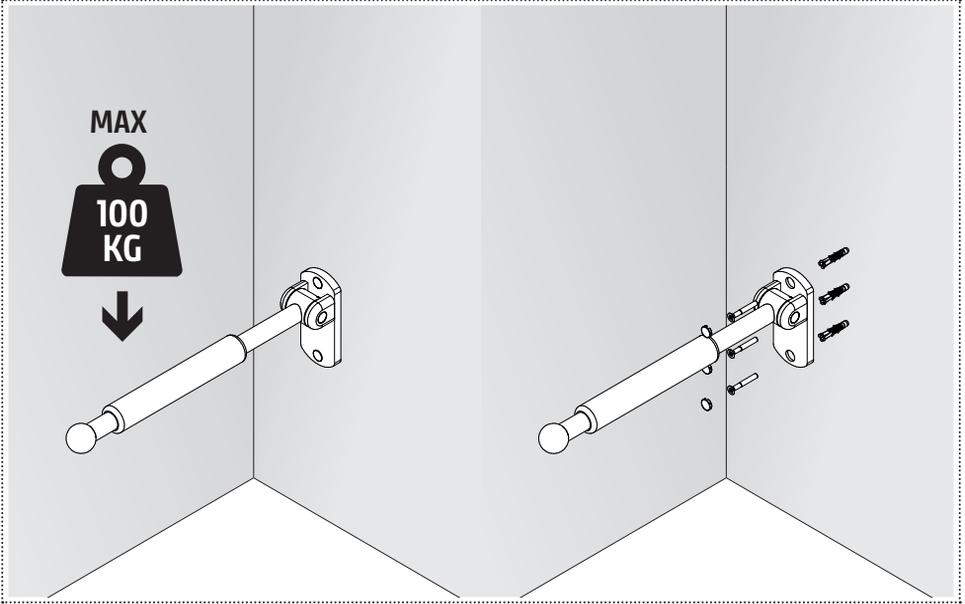


BILD 2



Prüfen Sie bitte folgende Voraussetzungen vor der Montage des Produkts »

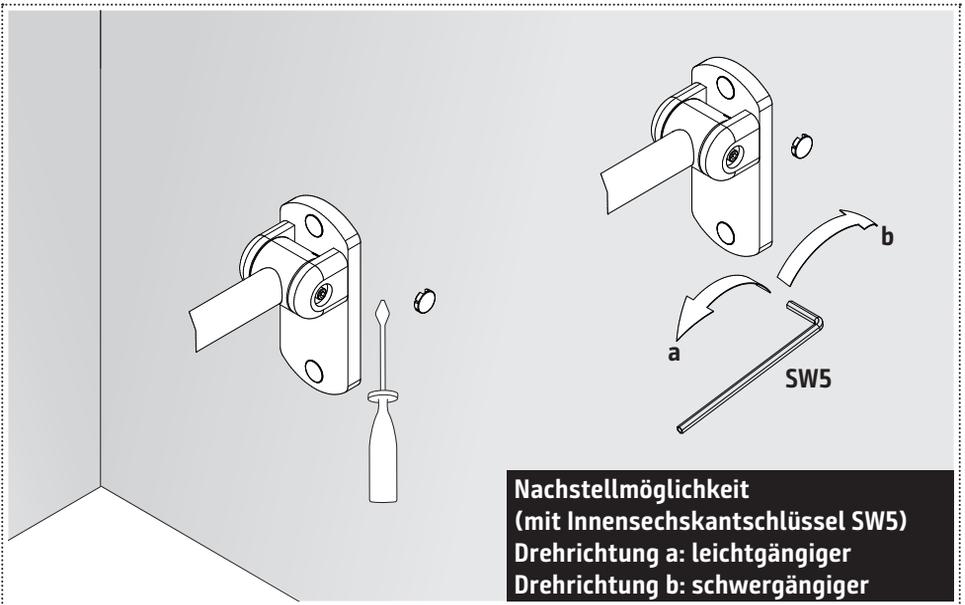

- » Die Wand muss über die nötige Tragfähigkeit verfügen.
- » Evtl. vorhandene Gas-, Wasser- und elektrische Leitungen dürfen bei der Montage nicht beschädigt werden.
- » Beachten Sie bitte vor der Montage die Montageempfehlungen der DIN 18040 Teil 1 und Teil 2.
- » Prüfen Sie die Verpackung auf den kompletten Lieferumfang (s. Rückseite).

MONTAGESCHRITTE

1. Bohrlöcher anreißen
2. Löcher bohren
(abhängig vom Montagehinweis der jeweiligen Befestigungssets)
3. Stützklappgriffe festschrauben, Überprüfung der Stabilität
4. Abschliessend die Abdeckkappen montieren,
Einkerbung sollte nach unten zeigen
5. Pflegeanleitung beachten!

HINWEISE

- » Montage sollte durch einen Fachmann durchgeführt werden
- » Regelmäßige Überprüfung der Stabilität und Standfestigkeit
- » Die Befestigungssets gehören nicht zum Lieferumfang des Stützgriffes, sondern sind entsprechend der Einbausituation / Wandbeschaffenheit separat zu bestellen (siehe Produktbeschreibung/Spezifikation).
- » Spezialdübel sind lt. Herstellerangaben zu verarbeiten.
- » Spezialwerkzeug und Spezialmörtel sind bauseitig zu stellen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Länge
HW0.1006.501	600 mm
HW0.1007.501	700 mm
HW0.1008.501	850 mm

ANWENDUNGSBEREICH

Das Produkt ist für die Wandmontage im sanitären Heimbereich konzipiert.

LIEFERUMFANG

» Stützklappgriff mit Armpolster